


<b>Désignation</b>	<b>LINGETTES MEDIBASE SACHET CITRON (100)</b>
<b>Référence</b>	3160747
<b>Photo produit</b>	
<b>Description produit</b>	Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante pour la désinfection des surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
<b>Caractéristiques et compositions</b>	<p>Produit destiné au nettoyage et à la désinfection rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des surfaces dures non poreuses en milieu médical et collectivités (poignées de porte, plan de travail, mobilier, sanitaires...).</li> <li>- Des surfaces dures ou poreuses des dispositifs médicaux non critiques, dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement (lits médicalisés, monitoring, connectiques et câbles...).</li> </ul> <p><b>Composition</b> : la solution d'imprégnation contient notamment :  Désinfectants/substances actives : didecyldiméthylammonium chlorure (N°CAS : 773-51-5) : 0.29% (m/m), Moins de 5% d'agents de surface non ioniques, parfums</p> <p><b>Spectre d'action</b> : 5 min 20°C :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bactéricide (EN16615* EN 13727*, EN 13697*, EN 1276**)</li> <li>• levuricide (EN 16615*, EN 13624*, EN 13697*, EN 1650**)</li> <li>• virucide à spectre limité (EN14476*, EN 16777*)</li> </ul> <p>*3g/L albumine bovine + 3 mL/L érythrocytes de mouton.  ** 3g/L albumine bovine.</p>
<b>Packaging</b>	Sachet de 100 lingettes
<b>Durée de vie</b>	24 mois
<b>Stockage</b>	Stocker à l'abri du gel et ne pas dépasser 40°C
<b>Indications d'utilisation</b>	<p><b>Mode d'emploi</b> :</p> Utiliser 4 lingettes par m <sup>2</sup> de surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer. Renouveler l'application chaque fois que nécessaire. Bien refermer le ppaq après chaque usage afin d'éviter le dessèchement des lingettes.

	<p>Il est conseillé de tester le produit sur une petite zone afin de tester la compatibilité avec la surface à traiter.</p> <p>Liste des matériaux compatibles sur demande.</p> <p>Produit incompatible avec le PC-ABS.</p> <p><b>Précautions d'emploi :</b></p> <p>E laver soigneusement les mains après utilisation. Eviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le récipient et son contenu dans les collecteurs appropriés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incident, contacter le centre antipoison le plus proche.</p>
<b>Informations légales</b>	Biocide TP2

Version 1.0 – 19/12/2024

<b>Désignation</b>	<b>LINGETTES MEDIBASE SACHET NIAOULI (100)</b>
<b>Référence</b>	3160746
<b>Photo produit</b>	
<b>Description produit</b>	Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante pour la désinfection des surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
<b>Caractéristiques et compositions</b>	<p>Produit destiné au nettoyage et à la désinfection rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des surfaces dures non poreuses en milieu médical et collectivités (poignées de porte, plan de travail, mobilier, sanitaires...).</li> <li>- Des surfaces dures ou poreuses des dispositifs médicaux non critiques, dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement (lits médicalisés, monitoring, connectiques et câbles...).</li> </ul> <p><b>Composition</b> : la solution d'imprégnation contient notamment :  Désinfectants/substances actives : didecyldiméthylammonium chloride (N°CAS : 773-51-5) : 0.29% (m/m), Moins de 5% d'agents de surface non ioniques, parfums</p> <p><b>Spectre d'action</b> : 5 min 20°C :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bactéricide (EN16615* EN 13727*, EN 13697*, EN 1276**)</li> <li>• levuricide (EN 16615*, EN 13624*, EN 13697*, EN 1650**)</li> <li>• virucide à spectre limité (EN14476*, EN 16777*)</li> </ul> <p>*3g/L albumine bovine + 3 mL/L érythrocytes de mouton.  ** 3g/L albumine bovine.</p>
<b>Packaging</b>	Sachet de 100 lingettes
<b>Durée de vie</b>	24 mois
<b>Stockage</b>	Stocker à l'abri du gel et ne pas dépasser 40°C
<b>Indications d'utilisation</b>	<p><b>Mode d'emploi :</b>  Utiliser 4 lingettes par m<sup>2</sup> de surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer. Renouveler l'application chaque fois que nécessaire. Bien refermer le pque après chaque usage afin d'éviter le dessèchement des lingettes.  Ul est conseillé de tester le produit sur une petite zone afin de tester la compatibilité avec la surface à traiter.</p>

	Liste des matériaux compatibles sur demande. Produit incompatible avec le PC-ABS. <b>Précautions d'emploi :</b> E laver soigneusement les mains après utilisation. Eviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le récipient et son contenu dans les collecteurs appropriés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incident, contacter le centre antipoison le plus proche.
<b>Informations légales</b>	Biocide TP2

Version 1.0 – 19/12/2024